



**PARI** komora  
ANTISTATIK

## Raste sa Vama

Bez obzira na uzrast, kod kuće ili na putu,  
**PARIkomora** je idealna za sve pacijente

### Osnovne osobine

- Antistatička komora s ventilom (VHC) za pouzdano izmjereno doziranje
- Proziran usnik za vizuelnu provjeru sa respiratornim ventilom malog otpora
- Univerzalni MDI adapter
- Može se dezinfikovati u kipućoj vodi ili parnim dezinfektorima
- SmartTouch® maska podesiva za svaku aplikaciju



[www.pari.de](http://www.pari.de)  
[www.bawariamed.net](http://www.bawariamed.net)



Od 0 do 2 godine  
sa Bejbi maskom Bubamara -  
Kat. Broj 035G20

Iznad 2 godine  
sa dječjom maskom Žaba  
Kat. broj 035G2040

Iznad 4 godine  
bez maske  
Kat. broj. 035G1000

Specialists in effective inhalation

**PARI** u BiH - BAWARIAMED doo  
+387 (0) 51 389-530 Pozovite nas ...



Kako da koristite

**PARI** komoru?

Žaba Feliks objašnjava način korištenja bubamari Meri.

1




Prvo skinite poklopac spreja, dozimetar inhalatora (MDI).  
Meri, ne zaboravi promućati sprej prije korištenja.

2



Zatim umetnite sprej u zeleni konekcioni prsten  
PARIkomore.  
Ukoliko koristite masku povežite je s usnikom.

3b

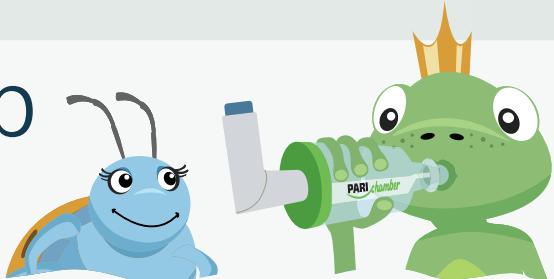


Kada postaneš starija, Meri, više nećeš trebati masku i možeš koristiti usnik. Nakon toga trebaš postaviti usnik PARIkomore između svojih zuba, i uviti usne oko usnika.

4



Sad, Meri, možeš prstom jedanput pritisnuti sprej.  
Trebaš disati polako i duboko.

3a

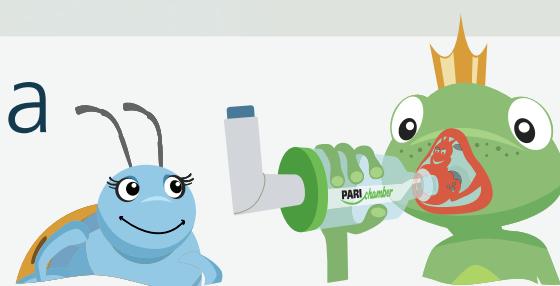


Postavite masku na lice i uvjerite se da se maska zatvara  
oko nosa i usta

5



Ako doktor prepiše dva  
ili više pritiska po  
aplikaciji, trebaš da  
ponoviš korake 3 i 4.

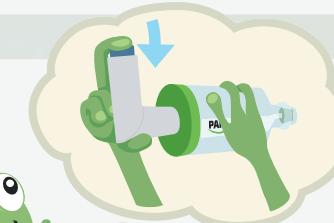

### Ne Zaboravite!

Ako ste mlađi od 18 mjeseci,  
inhalirajte 4 do 6 puta.  
Ako ste stariji od 18 mjeseci,  
inhalirajte 2 do 4 puta.

Kada završite, obavezno očistite  
PARIkomoru:

1 Uklonite prsten za povezivanje  
kao i masku ukoliko je  
povezana.



### Čišćenje:

2 Sve dijelove lagano ali temeljito  
očistite u toploj običnoj vodi sa  
dodatkom male količine  
sredstva za pranje. Isperite sve  
temeljito u svježoj čistoj vodi.



### Dezinfekcija:

3 PARIkomora kao i maska se mogu  
dezinfikovati u parnom  
dezinfekcionom aparatu.



4 Kao alternativu, stavite sve dijelove  
u kipuću vodu u periodu od  
5 minuta. PARIkomora treba  
da bude potpuno uronjena u  
vodu.



### Sušenje:

5 Dozvolite PARIkomori  
da se osuši na sobnoj  
temperaturi ili je  
osušite čistom  
lanenom krpm.



6 Odložite Vašu  
PARIkomoru na suho  
mjesto bez prašine.

